

Rotomove

Gebruikershandleiding

Stap 1



Plaats de Rotomove tegen het bed.
Let op!
Het bed dient in een lage beginstand te staan.

Stap 2



Positioneer de **verticale** buis van de Rotomove (de lakengeleider) in lijn met bovenkant schouder patiënt. Zet daarna de Rotomove op de rem.

Stap 3



Breng de Rotomove naar zijn beginstand.
De stand Rotomove is nu gelijk met de bovenkant van het matras.

Stap 4



Vouw de hoekpunten van het onderlaken terug.
Plaats het teruggeslagen laken strak op de Rotomove draairol.

Stap 5



Bevestig de lakenklem op de draairol. Eerst het midden van de klem aandrukken en daarna de beide uiteinden.

Stap 6



Plaats een schone onderlegger over de patiënt.
Plaats een kussen zijwaarts tegen/onder de patiënt.

Vervolg op achterzijde ->