

<- Begin op voorzijde

Stap 7



Plaats een schoon laken over de patiënt. Sla deze vervolgens aan Rotomove zijde voor de helft terug zodat je het zicht houdt op de patiënt.

Stap 8



Draai het onder en bovenlaken in elkaar op. Stop de opgerolde lakens tegen/onder de patiënt klem.

Stap 9



Start het draaien, de patiënt verplaats automatisch naar de zijkant van het bed en komt langzaam gecontroleerd in de kantelpositie terecht. Stop het draaien bij het bereiken van het kantel moment en hou de patiënt gecontroleerd zijwaarts. Houd de vuile onderlegger weg van de Rotomove.

Stap 10



Sla het op de patiënt gelegde schone laken terug en maak het bed voor de helft op. Controleer de positie van de schone onderlegger en het kussen. Pas de positie aan indien nodig.

Stap 11



Start met het draaien. Zodra de patiënt uit zichzelf kantelt **stop** met het draaien. Begeleid het kantelen naar de buik positie rustig en gecontroleerd.

Stap 12



Haal de Rotomove van de rem. Draai de Rotomove weg van het bed en neem hierbij het bevuilde laken en de onderlegger mee. Trek het schone onderlaken op zijn plek en maak deze zijde van het bed op.