

Rotomove

Gebruikershandleiding

Bekijk
instructievideo's:




Stap 1



Plaats de Rotomove tegen het bed.
Let op!
Het bed dient in een lage beginstand te staan.

Stap 2

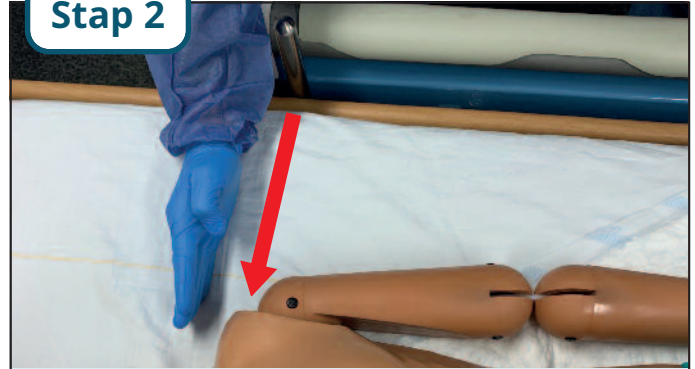


Positioneer de **verticale** buis van de Rotomove (de lakengeleider) in lijn met bovenkant schouder patiënt. Zet daarna de Rotomove op de rem.

Stap 3



Breng de Rotomove naar zijn beginstand.
De stand Rotomove is nu gelijk met de bovenkant van het matras.

Stap 4

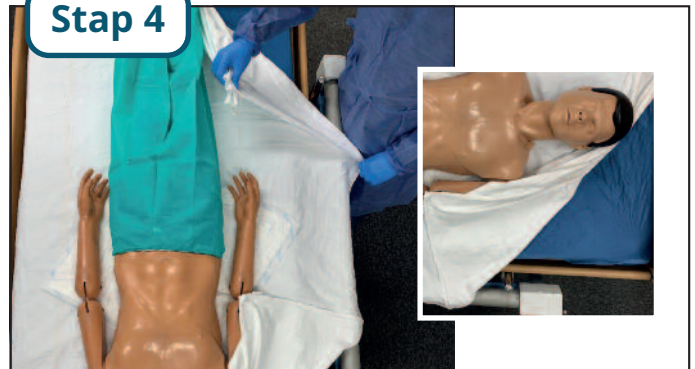

Vouw de hoekpunten van het onderlaken terug.
Plaats het teruggeslagen laken strak op de Rotomove draairol.

Stap 5



Bevestig de lakenklem op de draairol. Eerst het midden van de klem aandrukken en daarna de beide uiteinden.

Stap 6



Plaats een schone onderlegger over de patiënt.
Plaats een kussen zijwaarts tegen/onder de patiënt.

Vervolg op achterzijde ->

<- Begin op voorzijde

Stap 7



Plaats een schoon laken over de patiënt. Sla deze vervolgens aan Rotomove zijde voor de helft terug zodat je het zicht houdt op de patiënt.

Stap 8



Draai het onder en bovenlaken in elkaar op. Stop de opgerolde lakens tegen/onder de patiënt klem.

Stap 9



Start het draaien, de patiënt verplaats automatisch naar de zijkant van het bed en komt langzaam gecontroleerd in de kantelpositie terecht. Stop het draaien bij het bereiken van het kantel moment en hou de patiënt gecontroleerd zijwaarts. Houd de vuile onderlegger weg van de Rotomove.

Stap 10



Sla het op de patiënt gelegde schone laken terug en maak het bed voor de helft op. Controleer de positie van de schone onderlegger en het kussen. Pas de positie aan indien nodig.

Stap 11



Start met het draaien. Zodra de patiënt uit zichzelf kantelt **stop** met het draaien. Begeleid het kantelen naar de buik positie rustig en gecontroleerd.

Stap 12



Haal de Rotomove van de rem. Draai de Rotomove weg van het bed en neem hierbij het bevuilde laken en de onderlegger mee. Trek het schone onderlaken op zijn plek en maak deze zijde van het bed op.

ZS **TEBULO** Medical Systems

+31 (0)72 20 05 123
James Wattstraat 25
1817 DC Alkmaar
www.tebulomedicalsystems.com

Beoordeel de
Rotomove online:

