



Handleiding Rotomove



Inhoud

Waarschuwingen.....	blz.3
Technische gegevens.....	blz.3
Transport beveiliging	blz.4
Ingebruikname.....	blz.4
Beklemmingsgevaar.....	blz.4
Reiniging en onderhoud.....	blz.4
Storingen.....	blz.4

Waarschuwingen

Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U dient dit zorgvuldig te bestuderen alvorens u de Rotomove in gebruik neemt. In geval van twijfel kunt u de website raadplegen (www.tebulomedicalsystems.com), bied dit geen oplossing dient u contact op te nemen met de leverancier.

Indien u na aflevering een schade aan de Rotomove heeft vastgesteld meld u dit dan voor u de Rotomove in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.

Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, eigenschappen aan de Rotomove te veranderen.

Laat inspectie – en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de service dienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele onderdelen plaatsen.

Tracht in het geval van storing of defect dit niet zelf te repareren dit kan lijden tot letsel en schade.

Technische Gegevens

Afmetingen	Lengte: 135 cm Breedte: 59 cm Hoogte (laagste stand): 96 cm
Gewicht:	53 kg
Rolhoogte	Minimaal 88,5cm Maximaal 124,4cm Slag: $124,4 - 88,5 = 35,9$ cm
Bed hoogte	De ruimte tussen onderkant bed en vloer moet minimaal 12,5 cm bedragen. Deze ruimte is noodzakelijk om de voorste wielen van de Rotomove onder het frame van het bed te kunnen plaatsen..
Gewicht patiënt	Max. patiëntgewicht getest tot: 150 kg



Dit apparaat voldoet aan de EG 2017/745 richtlijn

Transportbeveiliging

Tijdens transport dient de Rotomove altijd deugdelijk verpakt te zijn. Om veilig de Rotomove te kunnen verplaatsen dienen de remmen van de zwenkwielen los gezet te worden. Klik beide rode pedalen omhoog, zodat de wieltjes vrij kunnen rollen.

Ingebruikname

Voor dat u de Rotomove in gebruik neemt dient al het verpakkingsmateriaal te zijn verwijderd. Bij het verplaatsen dient de Rotomove niet op de rem te staan. Zodra de Rotomove goed gepositioneerd staat tegen het bed dient u deze op de rem te zetten door de beide rode pedalen met de voet naar beneden te klikken. Zodra de pedalen vastklikken bevindt de Rotomove zich in de remstand. Vervolgens werkt u de kantelprocedure af zoals aangegeven in de instructie video's op de website of volgens de bedieningshandleiding. <https://www.tebulomedicalsystems.com/handleiding-rotomove/>

Beklemminggevaar

Tijdens de kantelprocedure dient u op geen enkel moment uw hand tussen de draairol en machine te plaatsen vanwege een mogelijk beklemmingsgevaar. Mocht toch uw hand beklemd raken draai de bewegingshendel in tegenovergestelde richting (tegen de klok in) en uw hand is niet langer vastgeklemd.

Reinigen en onderhoud

De Rotomove kan worden gereinigd met alle schoonmaakmiddelen die in de ziekenhuizen voor handen zijn.

In de Rotomove bevindt zich een gasveer deze is deugdelijk afgeschermd voor het dagelijks gebruik, evenals de inwendige draaimechanieken. Onder geen beding mag de gebruiker de Rotomove openmaken.

Storingen

Indien een storing zich voordoet, raadpleeg de website (www.tebulomedicalsystems.com) of neem contact op met leverancier.

Rotomove is een Klasse I apparaat en voldoet aan de EG 2017/745 richtlijn



ROTOMOVE ® Registered Trademark / Patent Pending